

トヨタ ハイメディック

OH アンクルセット

1台分一式 **19,800円** (税込)

強力両面テープ付きアンクルセット一式

コーナー用ゴムアンクル 1個

クリップ 20個

クリップ落下防止用紐 15本

感染症対策ビニールカーテン (クリア 1本)

テープ強度
アップ

事前準備で
緊急対応

クリップで
風煽り軽減

車体に直接テープ付きビニールカーテンを貼り付けると、材質や表面状態により剥がれやすい事があります。当製品ではテープの接着を助け、また取り外し時は剥がれやすいように設計されています。



アンクル設置後



カーテン準備完了

カーテンは設置後、クリップでまとめておくと邪魔にならず、下ろした際に下にクリップを留めて重りにすると風煽りを軽減する事ができます。



可能であればアンクルはビス (別売) で打ち込んで固定を行ってください



患者様の頭部廻りはクリップを紐固定して落下防止処置を行ってください。



束ねてください

ストレッチャーの乗降時はカーテンを開いて、**手すりのクリップで留める**事で、素早く行えます。




酸素吸入器等は隙間から通してお使い下さい。

製作
販売

CK Company

〒599-8248
大阪府堺市中区深井畑山町 237-4
☎072-260-4321 📠072-277-3036
✉info@ck-company.jp

OHアングルセット取り付け方

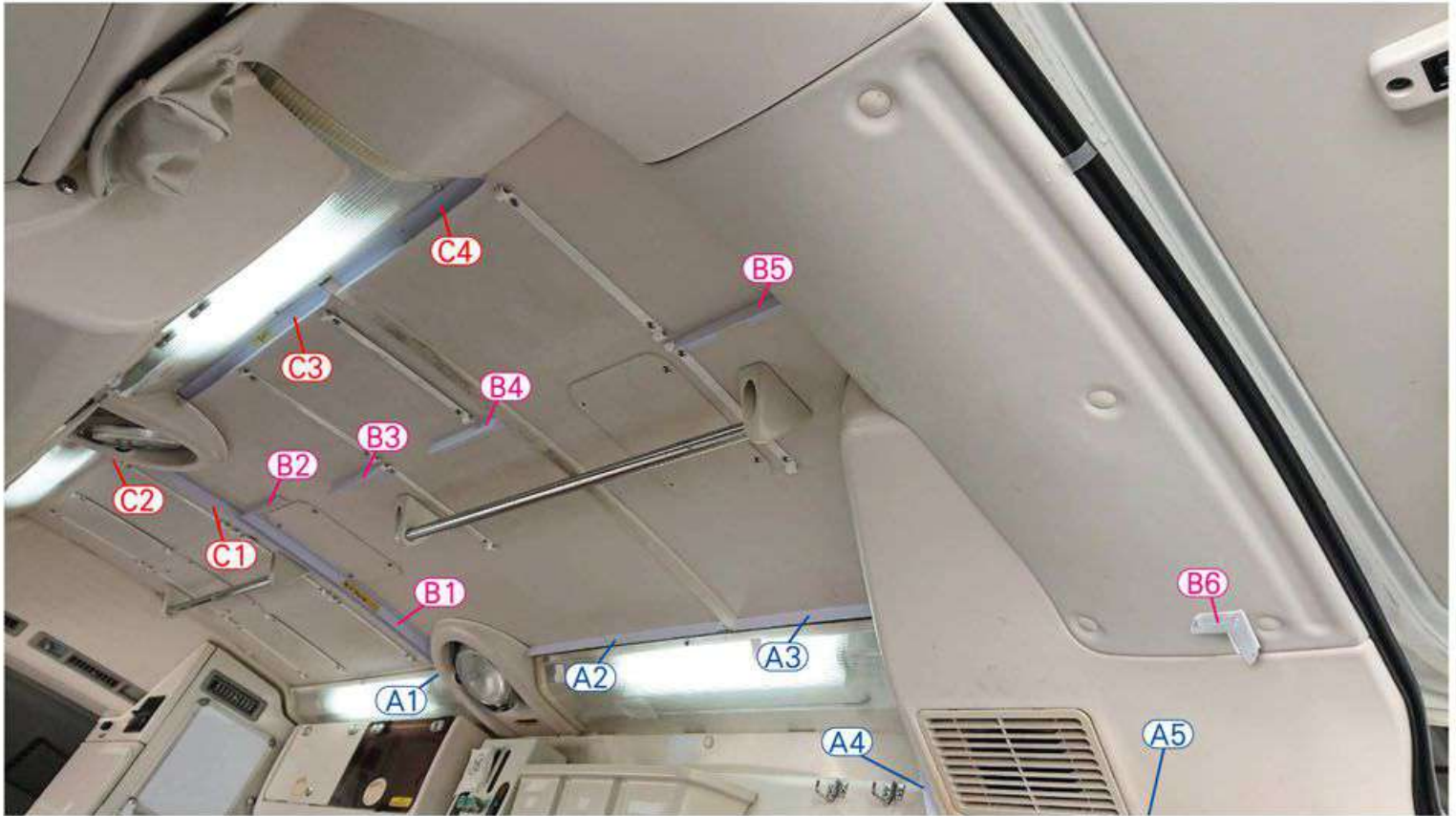

機器側 青グループ取付



A1

A1：丸ライト横に
車内側が縦になるよう
ライトの枠に沿って
貼り付けます



A2

A2：A1と同様に
ライト枠に沿って
貼り付けます



A3

A3：フレームから
壁までライト枠に
沿って貼り付けます




A4-5

A4：A3からテープが
張りやすい開始点から
A5と少しクロスする
位置に貼ってください



A4-5

A5：A4の終わりで
接点があり、ダクトに
近すぎないように
貼って下さい
※近すぎるとカーテンが
吸い込まれます。

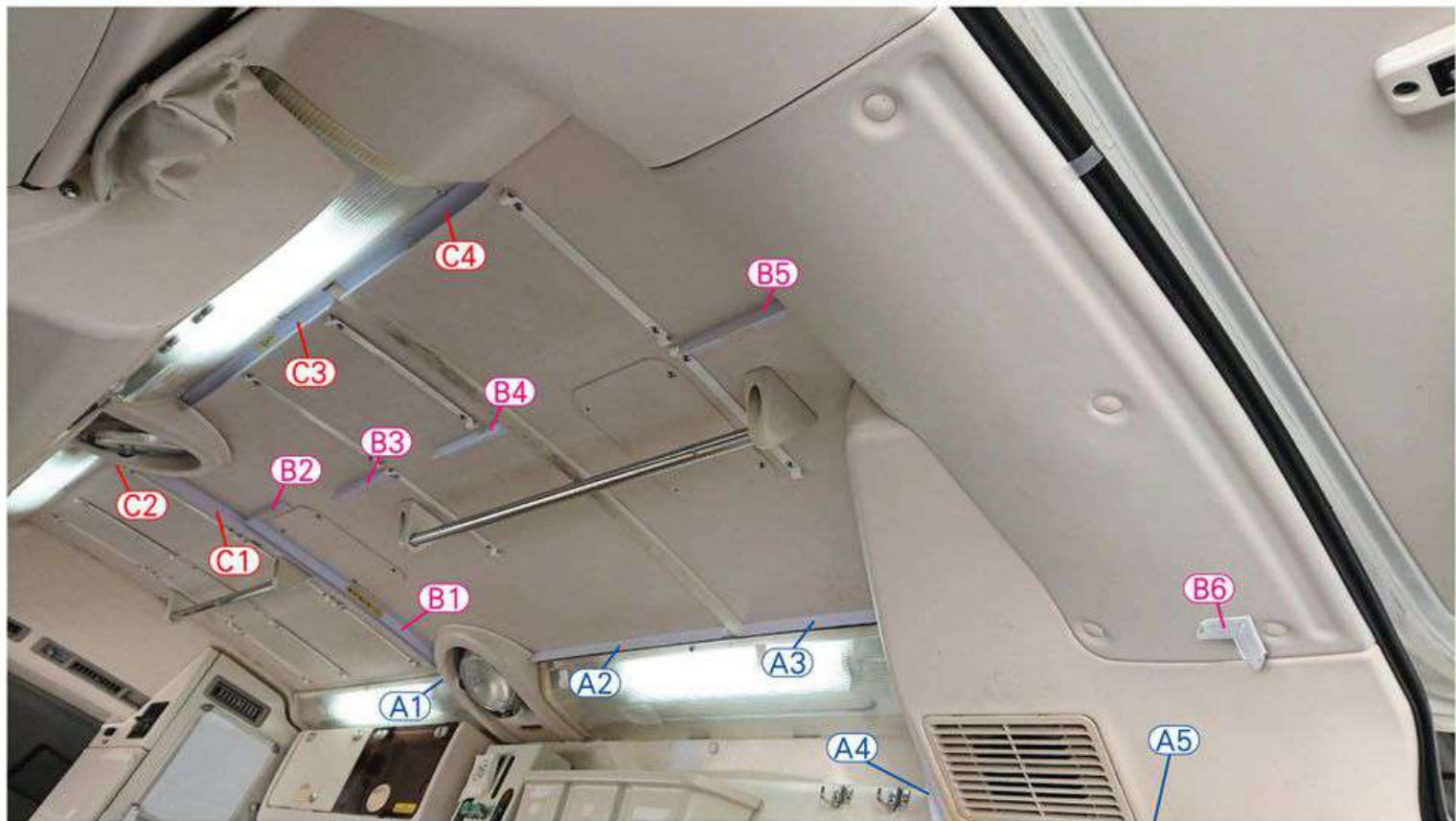

ベンチシート側 橙グループ取り付け方



B1 : A1の端から天井の四角カバーに沿って
貼り付けます。




B2 : B1の端から天井の四角カバーに沿って
貼り付けます。



B3~5 : B2からネットフレームの隙間を目印に貼り付けます



B6 : コーナー用L
アングルを天井クリップ
位置辺りに貼り付けます

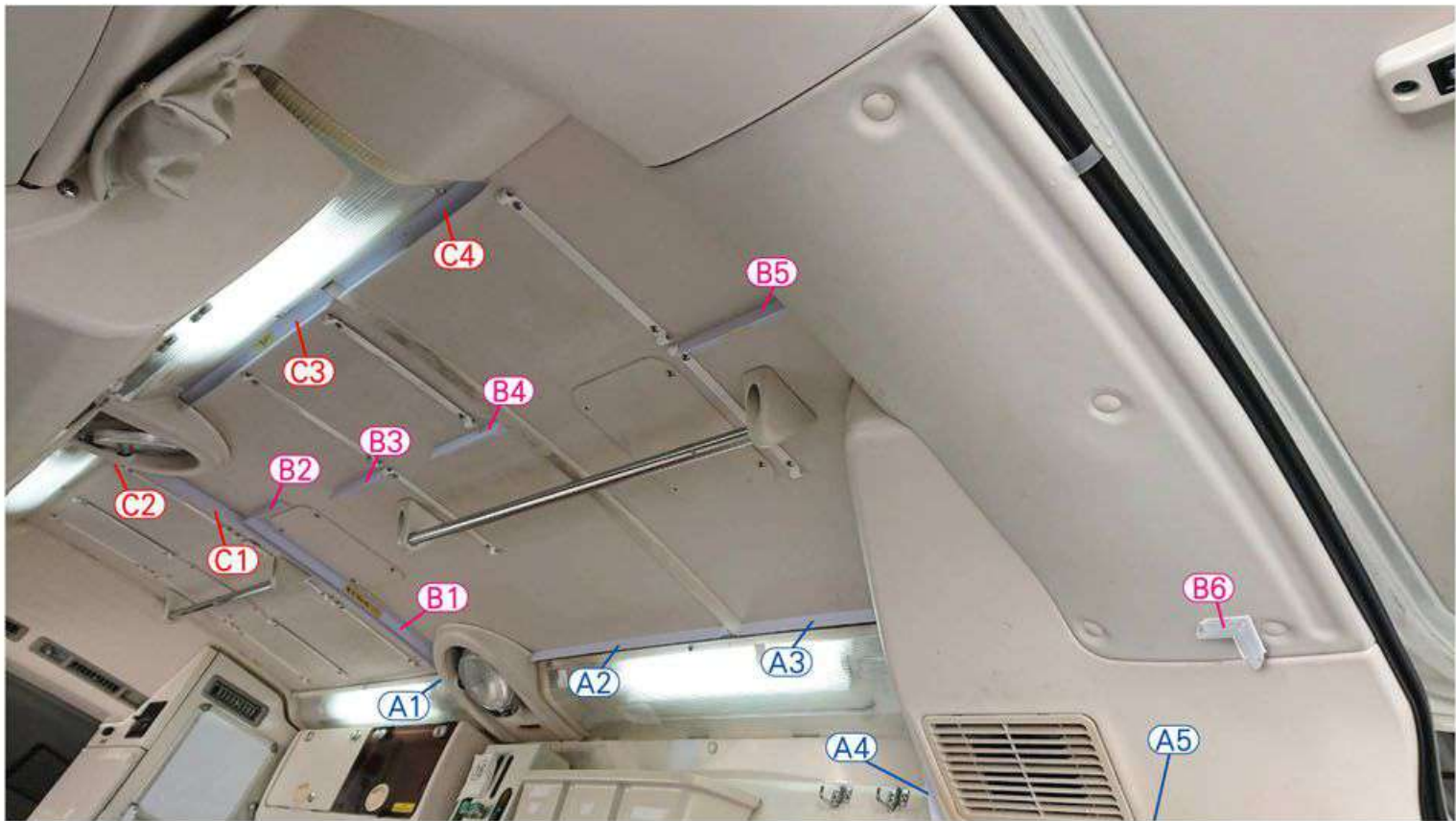

ベンチシート側 橙グループ取り付け方



C1 : 丸ライトのフレームから車内側が縦になるように、側面ライトに沿って貼り付けます



C3 : 丸ライトの反対側に壁ライトに沿って貼り付けます。



C2



C4

C4 : C3の横に壁ライトに沿って貼り付けます

⑦青の①と橙の①の先端が合うように貼り付けます。中央が反っているので気を付けて設置してください。
車両後ろが縦になるように貼り付けます