

CK Company オリジナル ストレッチャー用フードカバー SH

当製品は救急車にストレッチャーで患者様を乗せる際の「プライバシーを守る」「雨よけ」のニーズから製作に至った商品です。昨今の新型コロナウイルス対策にも「飛沫感染を防ぐ」観点から有用である事から、上面を透明にする事で患者様の状態確認を容易にするよう改善しました。

※昨今の炎天下や消毒液散布で透明ビニール部分の耐久が落ちる為、1～2年で劣化が見られる恐れがあります。



ファerno製車載ストレッチャー用 オリジナルフードカバー SH 63,800円（税込）

折りたたみ傘の様にフードをまとめて保管できます。



ストレッチャー固定用ベルトのマジックテープでストレッチャーに装着してご利用下さい。

装着イメージ



※ビニールカバーは他社製品・別売



製作・販売元

CK Company 有限会社
福祉事業部 A-Line Japan

〒599-8248

大阪府堺市中区深井畑山町 232-5

Tel:072-277-3035 Fax:072-277-3036

Mail:info@ck-company.jp

CK Company オリジナル ストレッチャー用フードカバー SH

本体のストレッチャーへの取付

- ① ストレッチャーに
フードカバーを
設置します。



○ 乗せるだけ

- ② 上部両サイドの
フレームとフード
カバーをベルトの
マジックテープで
しっかり固定
します。



- ③ 両脇のフレーム・
背面とフード
カバーをベルトの
マジックテープで
しっかり固定
します。



- ④ 4 か所固定したら
ぐらつきや傾きが
無いかチェックして
マットを下ろして
下さい。




取付完了です。



CK Company オリジナル ストレッチャー用フードカバー SH

利用時の使い方

①両脇の
ベルトを
解きます

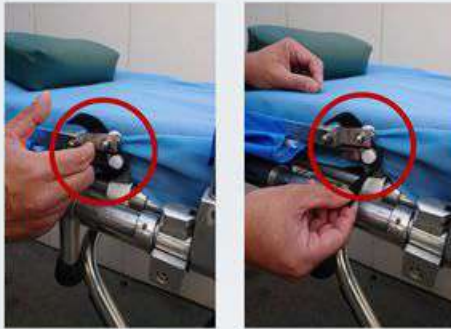

②上部のベルト左右を
解きます。



③巻かれたフードを
広げます。




④両サイドステーを
引き上げます。



○ 丸位置にくぼみがあります


⑤フードを開きます

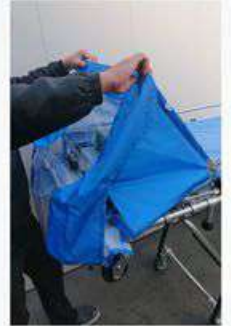

⑥フード横のマジック
テープをとめます。



設置完了です

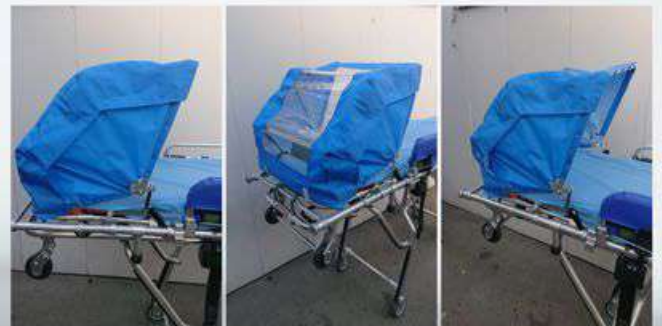

カバーをかければ
雨風を防ぎ
飛沫感染予防が
より高品位と
なります。(写真のカバーは社外品)



CK Company オリジナル ストレッチャー用フードカバー SH

収納方法

①フード両脇のマジックテープをはがして6割程たたみます。



②折り目を外に出します。



③最後までフードを引いてたたみます。



④フードを巻き取ったら下の写真の様にベルトを内側に折り込んで固定ベルトを巻いてマジックテープで固定します。



⑤両サイドのアームを溝から引き揚げて頭方向へスライドして収納します。



⑥固定ベルトを巻いてマジックテープで固定します。



収納完了です

